

	<b>NOTICE SAV</b> <b>LIT FLOORE V4</b> <b>PROCEDURE DE REMPLACEMENT DU</b> <b>CABLE D'ALIMENTATION</b>	93 669 200
		INDICE A
		16/12/2020

## Notice d'instructions


### Outils nécessaires pour cette procédure :

Tournevis cruciforme  
Clé Torx


### Procédure :

**ATTENTION** : Débrancher la prise de courant pour votre sécurité.

**1/** Le boîtier centrale se situe au centre du lit, il commande l'inclinaison du buste et des pieds.

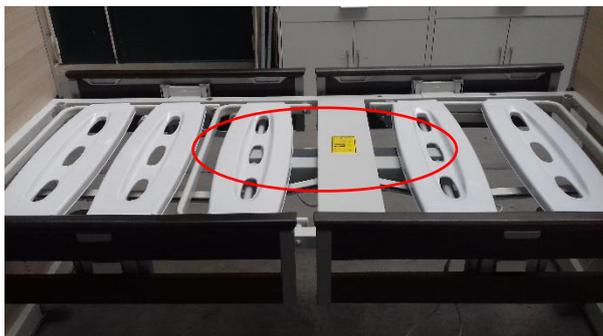

Enlever les 2 lattes situées haut dessus du boîtier en tirant vers le haut.

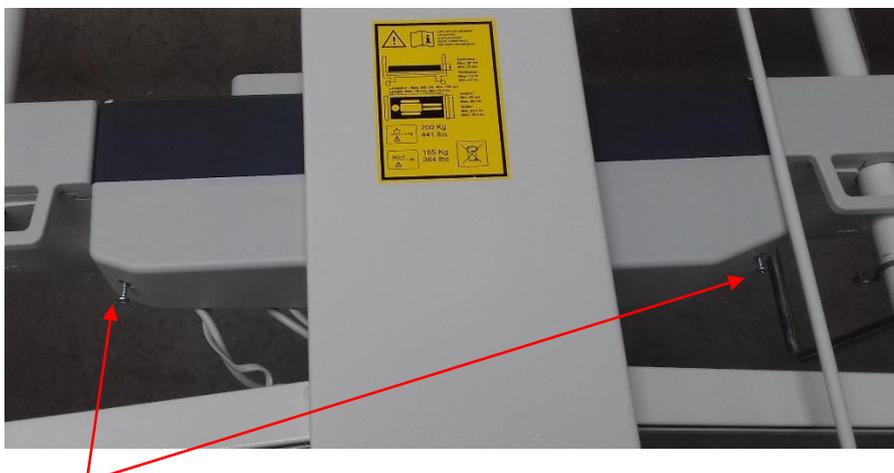

Enlever les 2 vis du capot (tournevis cruciforme) sortir sur quelques centimètres les câbles des goulottes si besoin.

**2/** Une fois le capot enlevé, débrancher la prise et retirer le câble de la goulotte



**3/** Utiliser la clé Torx pour deviser les deux serre-câbles situés sur la partie basse extérieure et intérieure de la colonne de tête.



**4/** Retirer le câble d'alimentation en passant la prise coté Duomat 9 entre la barre de liaison et la colonne.



Le câbles est ensuite libre.

Vous pouvez ensuite réaliser les opérations inverses pour remonter le câble d'alimentation neuf.