



A MEDJUNIC COMPANY

Créativité & innovation au service de la collectivité

35 Bd de l'Europe  
42380 LA TOURETTE – France

Tél. +33 (0)4 77 50 05 13  
Fax +33 (0)4 77 50 06 05


contact@groupe-ahf.fr – www.groupe-ahf.fr



## NOTICE D'INSTALLATION DU LIT FLOORE

Lors de la livraison du lit les panneaux de lit sont placés sur le sommier afin de les protéger lors du transport. Les deux butées pare-chocs sont placées dans un sachet sur le sommier du lit.

Une fois le lit placé dans la chambre retirer les butées de leur sachet et venir les visser sur la partie basse de la colonne coté tête.

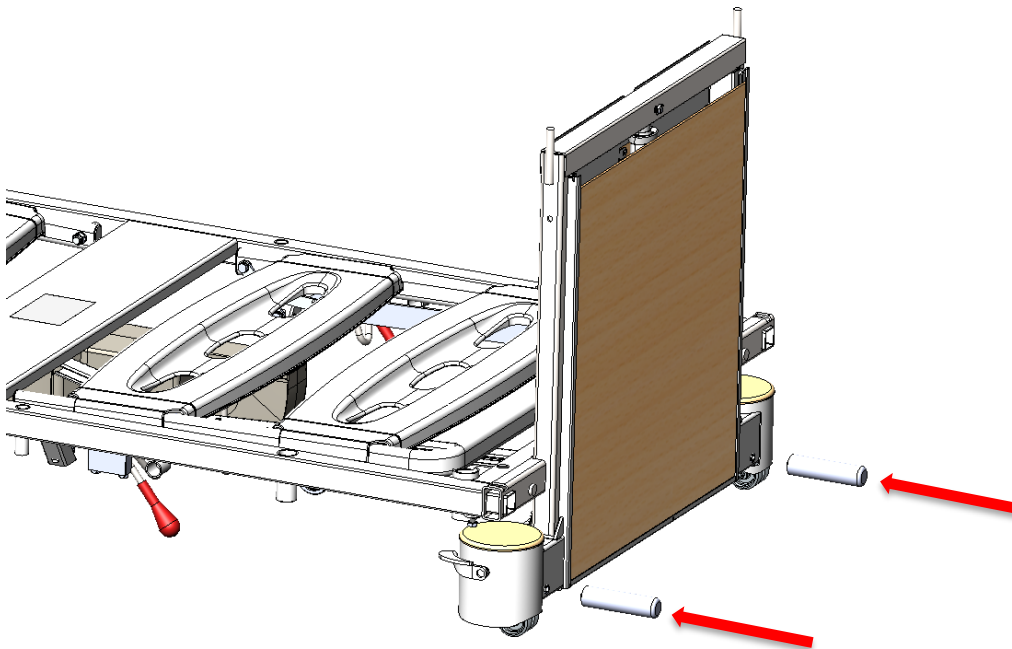

Retirer les protections des panneaux.

Les panneaux coté tête et pieds sont identiques à l'exception du panel de commande intégré dans le panneau de pied




A MEDIUNIC COMPANY

Créativité & innovation au service de la collectivité


35 Bd de l'Europe  
42380 LA TOURETTE – France

Tél. +33 (0)4 77 50 05 13  
Fax +33 (0)4 77 50 06 05

contact@groupe-ahf.fr – www.groupe-ahf.fr

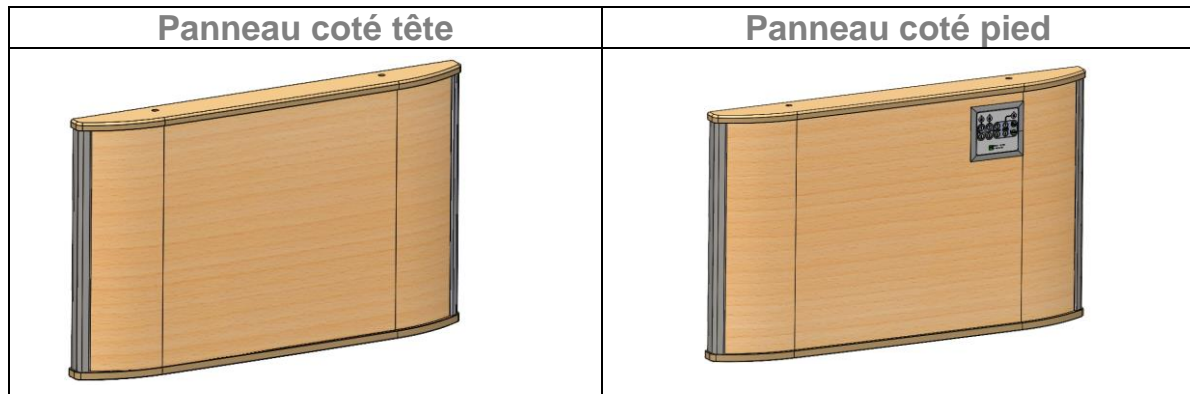


Tête

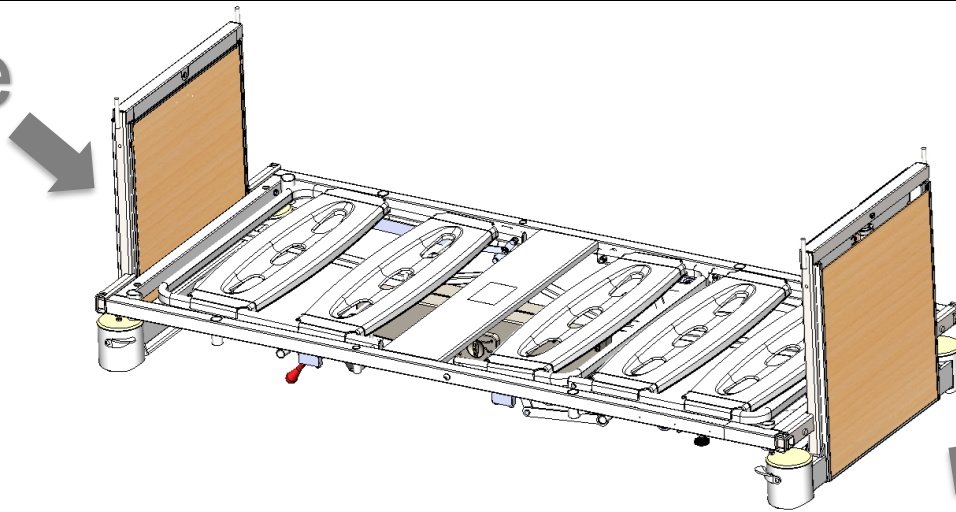

Pied

Enfiler respectivement les panneaux tête et pied sur les colonnes tête et pied du lit. Derrière le décor intérieur du panneau deux crochets viennent se positionner sur le sommier du lit.

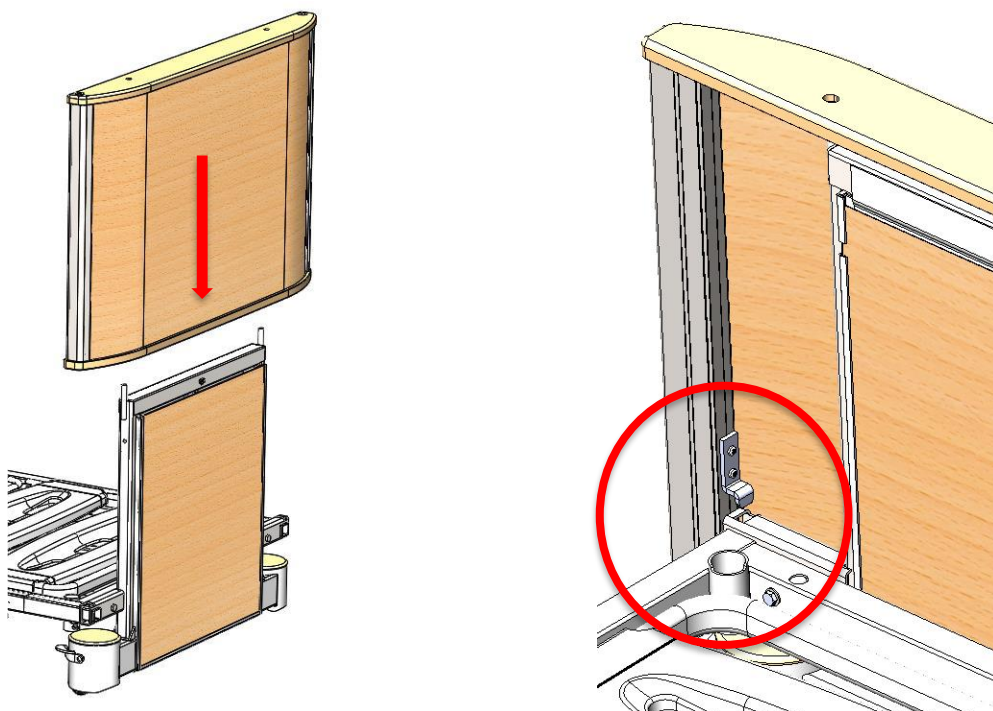

ATELIERS DU HAUT FOREZ  
SAS au capital de 1 020 000 €  
N° SIREN : 885 550 376 00051  
Code NAF : 3250A  
TVA Intracommunautaire : FR08885550376

LE MOBILIER MEDICAL  
DEPUIS 1947





A MEDJUNIC COMPANY


Créativité & innovation au service de la collectivité

35 Bd de l'Europe  
42380 LA TOURETTE – France



Tél. +33 (0)4 77 50 05 13  
Fax +33 (0)4 77 50 06 05

contact@groupe-ahf.fr – www.groupe-ahf.fr

Réaliser la même opération coté pied de lit. Il faut cependant passer le câble de front de panel et le brancher sur la prise à l'extrémité de la goulotte coté pied. Attention au sens de branchement. Un détrompeur est présent sur le lit et sur la prise.

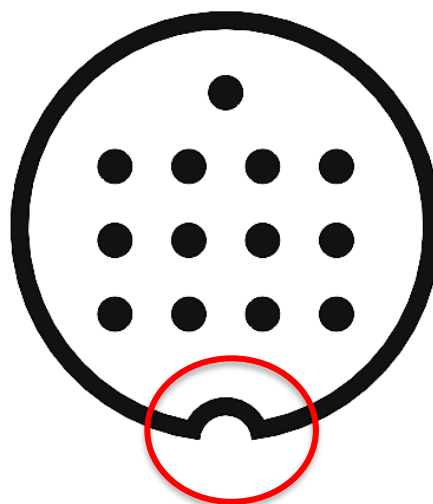

Placer les deux mains courantes sur les panneaux et serrer les quatre vis sans tête à l'aide d'une clé 6 pan. Pour un meilleur esthétique placer les mains courantes de façon à ce que les vis soit face au mur.

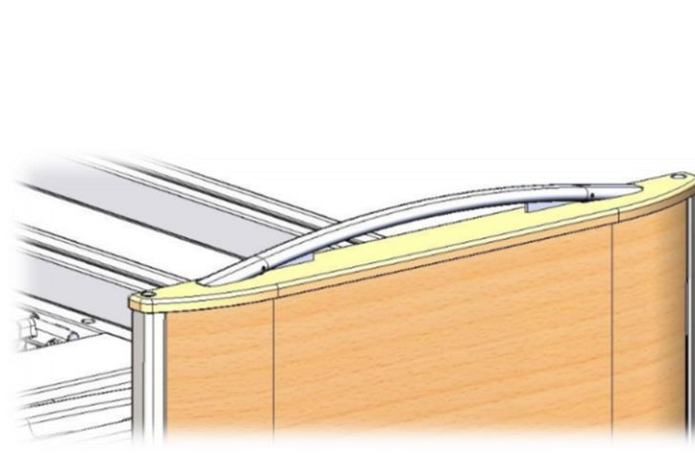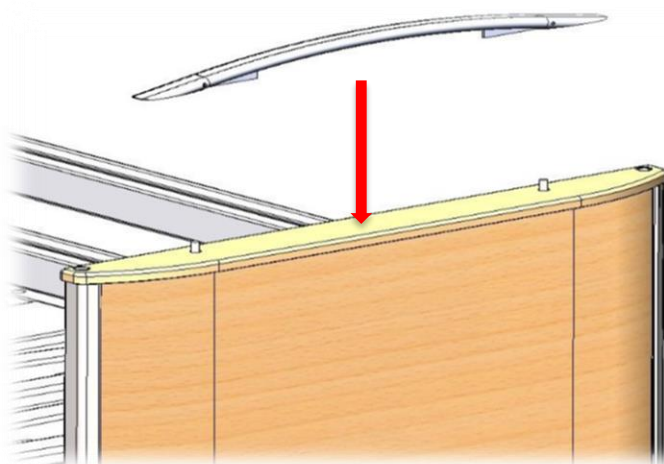

Brancher le lit au secteur pour le rendre opérationnelle.